


Doro Secure[®] 580IUP

Gebruikershandleiding

Nederlands

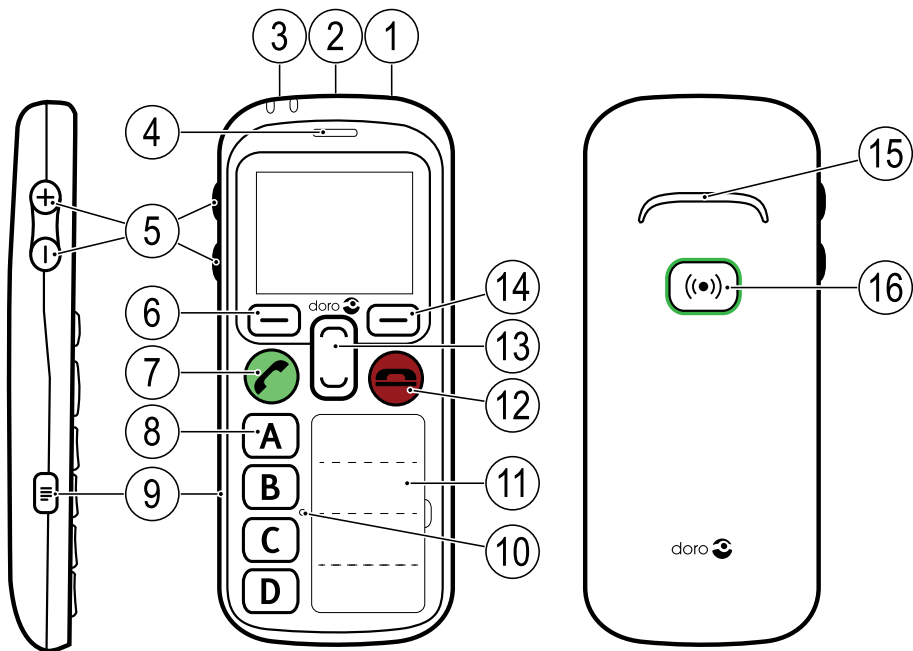





NB Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en geven het eigenlijke apparaat mogelijk niet accuraat weer.

Nederlands

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. In-/uitschakelen | 10. Microfoon |
| 2. Headsetaansluiting | 11. Namenlijst |
| 3. Laadaansluiting | 12. Toets Oproep beëindigen/
Terug |
| 4. Oorstuk | 13. Navigatieknoppen |
| 5. Volumeknoppen (+/-) | 14. Rechter selectieknop |
| 6. Linker selectieknop | 15. Luidspreker |
| 7. Oproeptoets | 16. Hulpknop |
| 8. Snelkiestoetsen (A-D) | |
| 9. Menu Instellingen | |

Wat er bij uw telefoon wordt geleverd, is afhankelijk van de software en beschikbare accessoires in uw regio of wat uw serviceprovider aanbiedt. U kunt altijd aanvullende accessoires bij uw plaatselijke Doro-dealer aanschaffen. De meegeleverde accessoires bieden de beste werking met uw telefoon.

Inhoud

Gefeliciteerd met uw aankoop.....	1
De telefoon gebruiken.....	1
Aan de slag	1
De telefoon opladen.....	1
De telefoon inschakelen	2
De telefoon uitschakelen.....	3
Met de telefoon navigeren 	3
Statusbalk.....	3
Oproepen	4
Een oproep maken	4
Een oproep beantwoorden	5
Volumeregeling.....	5
Handsfreemodus.....	6
Headset.....	6
Noodoproepen.....	7
Hulpknop.....	7
Extra functies.....	7
Toetsen blokkeren	8
Mijn nummer	8
ICE 	8
Veiligheidstimer	8
Berichten.....	9
Oproeplog.....	10
IUP	10

Gefeliciteerd met uw aankoop

Een gemakkelijke mobiele telefoon voor verbeterde veiligheid. Duurzame en spatbestendige (IP54) mobiele telefoon met vier snelkiestoetsen om met één simpele druk op de knop mensen te bellen op wie u kunt rekenen. Voel u nog veiliger dankzij een hulpknop en een veiligheidstimer die automatisch een nummer kan kiezen en een sms-waarschuwing kan versturen naar vooraf ingestelde nummers. Met gps-lokalisering laat u mensen weten waar u bent. Uw contactpersonen kunnen via het internet beheerd worden door een betrouwbaar familielid met My Doro Manager. Ga voor meer informatie over accessoires of andere producten van Doro naar www.doro.com.

De telefoon gebruiken


Aan de slag

De telefoon opladen




VOORZICHTIG

Gebruik alleen de batterijen, lader en accessoires die voor dit specifieke model zijn goedgekeurd. Het aansluiten van andere accessoires kan gevaarlijk zijn en de typegoedkeuring en garantie van de telefoon kunnen erdoor komen te vervallen.

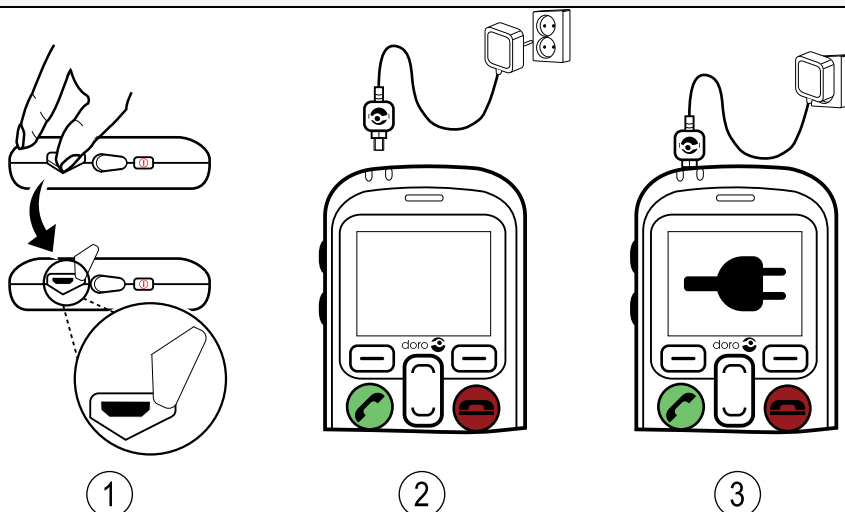


NB Wanneer u de batterij volledig hebt opgeladen en de lader van het apparaat hebt losgekoppeld, trekt u de stekker van de lader uit het stopcontact om energie te besparen.


Tip: Gebruik de houder om uw apparaat te laden.

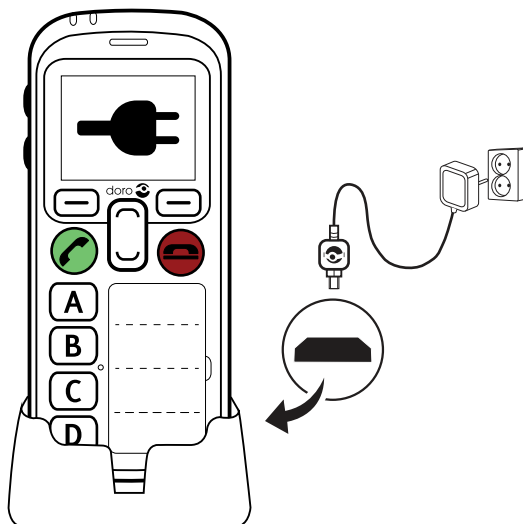

De telefoon inschakelen

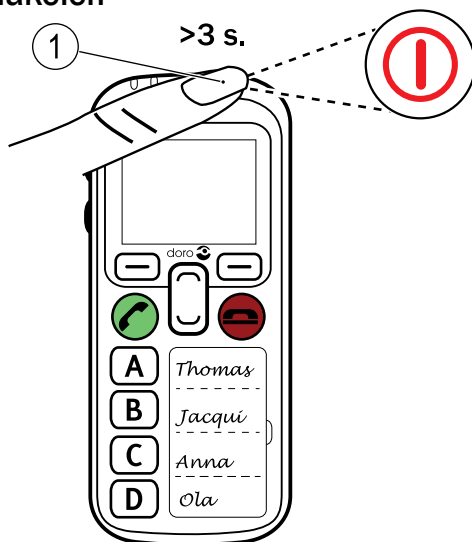

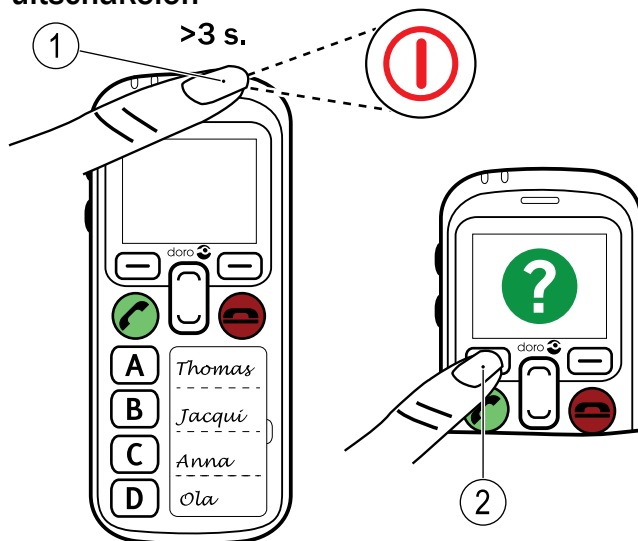

De telefoon uitschakelen



Met de telefoon navigeren

Stand-bymodus (ruststand)

Wanneer de telefoon klaar is voor gebruik en u nog geen enkel teken hebt ingetoetst, staat de telefoon in de stand-bymodus.









- Druk op  om terug te keren naar de stand-bymodus.
- Druk op de linker selectieknop  om toegang te krijgen tot het Menu.

Bladeren

- Gebruik de pijlknoppen  /  om in menu's te bladeren.


Statusbalk

	Signaalsterkte (hoe meer strepen, des te betere signaalsterkte)		Geen netwerk
	Batterijniveau (hoe meer strepen, des te meer de batterij is opgeladen)		Alleen beltoon voor inkomende oproepen
	Beltoon en trilsignaal voor inkomende oproepen		Alleen trilsignaal voor inkomende oproepen


	Stil. Geen beltoon of trilsignaal voor inkomende oproepen.		Gemiste oproep
	Ongelezen sms-berichten		Headset aangesloten
	Bluetooth ingeschakeld		Actieve Gps
	Actieve veiligheidstimer		Actieve IUP-functie

Oproepen


Een oproep maken

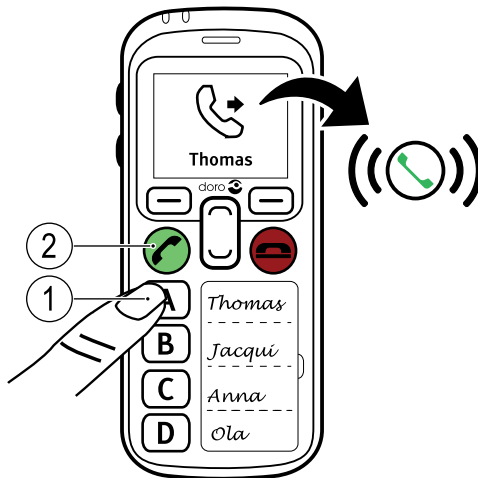

Een oproep beantwoorden

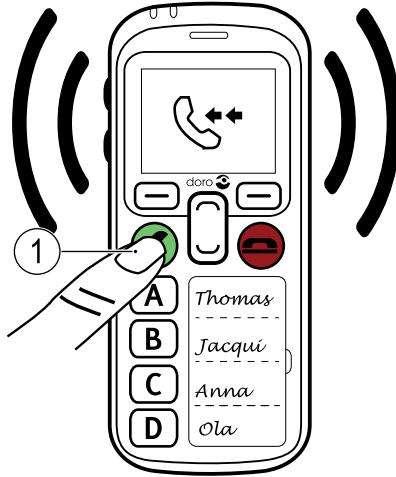


Volumeregeling

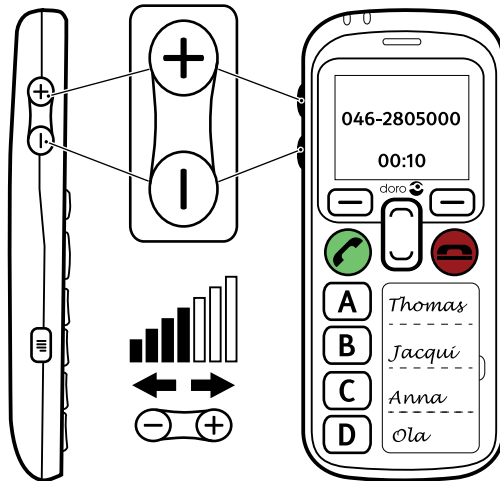


Handsfreemodus

Via de luidspreker kunt u praten zonder dat u de telefoon vlak bij uw oor hoeft te houden. Praat duidelijk in de microfoon van de telefoon (A) op een maximale afstand van 1 m.

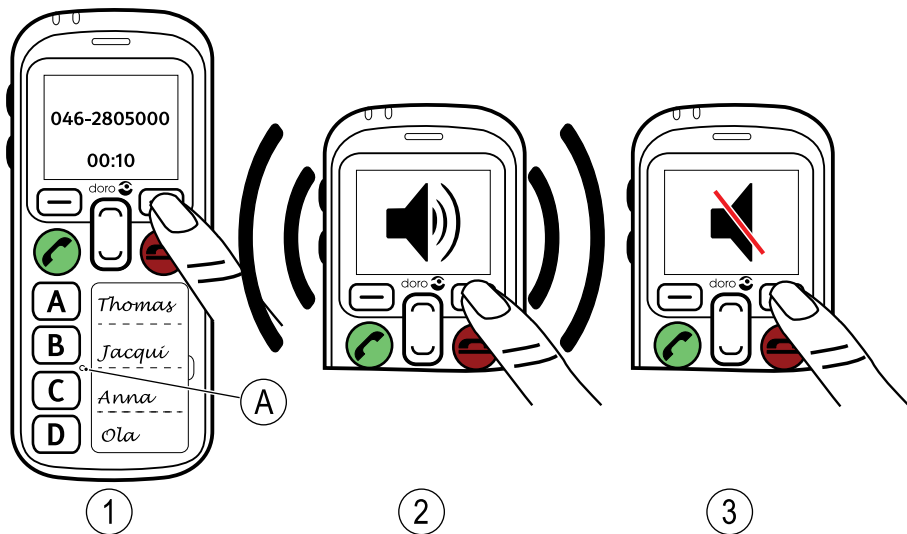

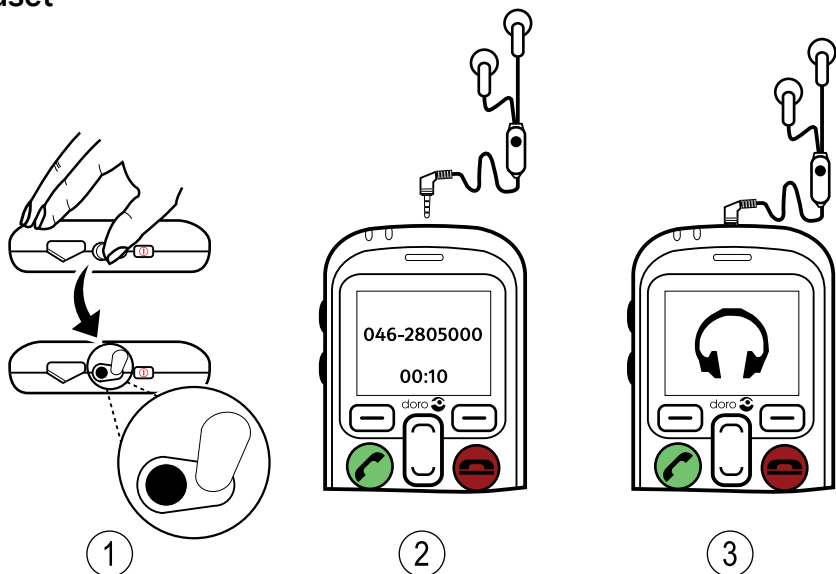

Headset



Noodoproepen

Als de telefoon aanstaat, kunt u altijd een noodoproep doen.

1. Druk op **Menu** en selecteer  **Noodoproep**.
2. Selecteer **Kies** of druk op .

NB Sommige netwerken accepteren oproepen naar hulpdiensten zonder geldige simkaart. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.




Hulpknop

VOORZICHTIG

Wanneer er een hulpoproep wordt geactiveerd, wordt de telefoon automatisch in de handsfree-/luidsprekermodus gezet. Houd het toestel niet dicht bij uw oor wanneer de handsfreemodus actief is, omdat het geluid erg hard kan staan.

Via de hulpknop hebt u snel toegang tot vooraf ingestelde hulpnummers voor situaties waarin u hulp nodig hebt.

Een hulpoproep maken


1. Wanneer u hulp nodig hebt, houd dan de hulpknop  3 seconden ingedrukt of druk tweemaal binnen 1 seconde op deze knop. De hulpoproep begint na een vertraging. Dit geeft u de tijd om een vals alarm te voorkomen door op  te drukken.
2. Er wordt een hulp-sms naar alle ontvangers verstuurd.
3. Er wordt een positiebericht (sms-bericht) naar alle ontvangers verstuurd.
4. De eerste ontvanger in de lijst wordt gebeld. Als de oproep niet binnen 25 seconden wordt beantwoord, wordt het volgende nummer gebeld. Het kiezen wordt 3 keer herhaald of totdat de oproep wordt beantwoord of er op  wordt gedrukt.

Extra functies


De in dit gedeelte beschreven functies zijn optioneel en kunnen, afhankelijk van de instellingen van de telefoon, variëren.

Toetsen blokkeren

U kunt het toetsenbord vergrendelen om te voorkomen dat de toetsen per ongeluk worden ingedrukt, bijvoorbeeld wanneer de telefoon in uw handtas zit.

U kunt een inkomende oproep beantwoorden door op  te drukken, ook als de toetsblokkering is ingeschakeld. Tijdens het gesprek is de blokkering van de toetsen tijdelijk opgeheven. Als de oproep wordt beëindigd of geweigerd, worden de toetsen weer geblokkeerd.

Toetsen blokkeren

1. Druk op **Menu** en selecteer  **Tts. vergr..**
2. Druk op **Vergr..**


Deblokkeren

- Druk op **Vrijgeven** → **Ja**.

NB Afhankelijk van de instellingen van de telefoon kunt u automatische toetsenblokkering inschakelen na een bepaalde ingestelde tijd.


Mijn nummer

Het telefoonnummer dat is toegekend aan uw simkaart wordt bewaard als **Mijn nr..**

1. Druk op **Menu** en selecteer  **Mijn nr..**
2. Druk op **OK** om het te bekijken.

ICE

In noodgevallen kunnen eerstehulpverleners deze extra informatie, zoals medische informatie, op de telefoon van de persoon in kwestie bekijken. In geval van letsel is het essentieel om zo snel mogelijk over deze informatie te beschikken, waardoor de overlevingskansen kunnen toenemen.


1. Druk op **Menu** en selecteer  **ICE**.
2. Druk op **OK** om het te bekijken.

Veiligheidstimer

Activeer de veiligheidstimer om contact op te nemen met uw vooraf ingestelde hulpsnummers, wanneer u hulp nodig hebt. Een voorbeeld: activeer voordat u een douche neemt de veiligheidstimer. Mocht u deze binnen

een bepaalde ingestelde tijd niet deactiveren, dan worden uw van tevoren bepaalde hulpnummers op de hoogte gesteld.


De veiligheidstimer inschakelen

1. Druk op **Menu** en selecteer  **Veiligh.timer**.
2. Selecteer **Functie aan/uit** → **Aan** om te activeren.


De veiligheidstimer uitschakelen

- Druk op **Annul**.

De tijd instellen

1. Druk op **Menu** en selecteer  **Veiligh.timer**.
2. Selecteer **Tijd** en gebruik de zijknoppen **+/-** om de tijd (maximaal 120 minuten) in te voeren.
3. Druk op **OK** om te bevestigen.


Het geluid aan- en uitzetten


1. Druk op **Menu** en selecteer  **Veiligh.timer**.
2. Selecteer **Geluid**.
3. Selecteer **Aan** voor inschakelen of **Uit** voor uitschakelen.
4. Druk op **OK** om te bevestigen.

Berichten

U kunt 200 sms-berichten op uw Doro Secure® 580IUP ontvangen.







NB Wanneer u de maximumlimiet hebt bereikt, wordt het oudste sms-bericht vervangen zodat u het nieuwe kunt ontvangen.

1. Druk op **Menu** en selecteer  **Berichten**.
2. Selecteer **Lees**.
3. Druk op **Terug** om af te sluiten.

Tip: Wanneer u een nieuw bericht ontvangt, kunt u **Ja** selecteren om het te lezen. Controleer de statusbalk voor nieuwe berichten,  wordt weergegeven.

Oproeplog

Ontvangen, gemiste en verzonden oproepen worden in een gecombineerd oproeplogbestand opgeslagen.

1. Druk op **Menu** en selecteer  **Oproepenlog**.
2. Gebruik / om te selecteren:
 -  Inkomende
 -  Uitgaande
 -  Gemiste oproepen
3. Selecteer **Weerg..**

IUP

De functie Gevallen (IUP) dient ter persoonlijke bescherming. Hiermee kan handmatig of automatisch een alarmmelding worden verzonden naar vooraf ingestelde nummers in de lijst met noodnummers.

Alarmfuncties


NB U kunt het alarm altijd deactiveren door te drukken op .


De functie Gevallen is tijdelijk inactief bij het opladen van de telefoon, tijdens een telefoongesprek en tijdens het doorlopen van de menu's van de telefoon.

Horizontaal

- **Niet-alarmerende stand:** het apparaat bevindt zich in horizontale positie, bijvoorbeeld aan een riemclip **(A)**.
- **Automatische volgorde:** Ja.

Volgorde noodoproepen


1. De telefoon wordt gedurende meer dan 15 seconden ongeveer 45° gedraaid ten opzichte van de horizontale positie **(B)**.
2. De alarmprocedure wordt na 30 seconden in werking gezet **(C)**.
3. Om dit te annuleren plaatst u de telefoon binnen 25 seconden in horizontale positie **(A)** OF u drukt op **Ja** om te annuleren. Indien geen handeling volgt gebeurt het volgende:
 - Er wordt een hulp-sms naar alle ontvangers verstuurd.
 - Er wordt een positiebericht (sms-bericht) naar alle ontvangers verstuurd.
 - De eerste ontvanger in de lijst wordt gebeld. Als de oproep niet binnen 25 seconden wordt beantwoord, wordt het volgende nummer gebeld. Het kiezen wordt 3 keer herhaald of totdat de oproep wordt beantwoord of er op  wordt gedrukt.

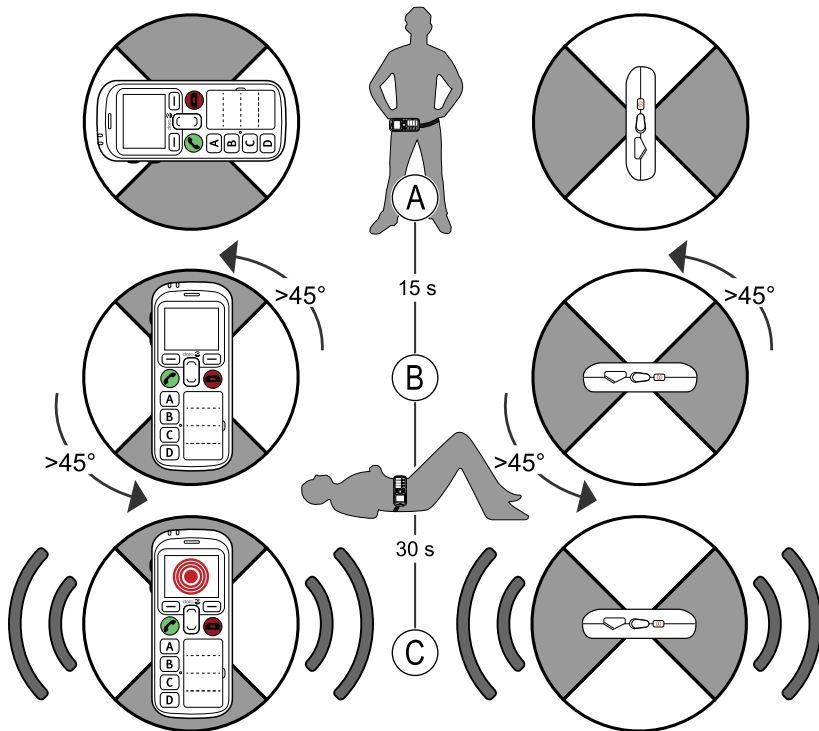


Verticaal

- **Niet-alarmerende stand:** het apparaat bevindt zich in verticale positie, bijvoorbeeld in een broek-/jaszak of aan een draagkoord **(A)**.
- **Automatische volgorde:** Ja.

Volgorde noodoproepen

1. De telefoon bevindt zich meer dan 15 seconden in een hoek van ongeveer 45° ten opzichte van de verticale positie **(B)**.
2. De alarmprocedure wordt na 30 seconden in werking gezet **(C)**.
3. Om te annuleren plaatst u de telefoon binnen 25 seconden in een verticale positie **(A)** OF u drukt op **Ja** om te annuleren. Indien geen handeling volgt gebeurt het volgende:
 - Er wordt een hulp-sms naar alle ontvangers verstuurd.
 - Er wordt een positiebericht (sms-bericht) naar alle ontvangers verstuurd.
 - De eerste ontvanger in de lijst wordt gebeld. Als de oproep niet binnen 25 seconden wordt beantwoord, wordt het volgende nummer gebeld. Het kiezen wordt 3 keer herhaald of totdat de oproep wordt beantwoord of er op  wordt gedrukt.

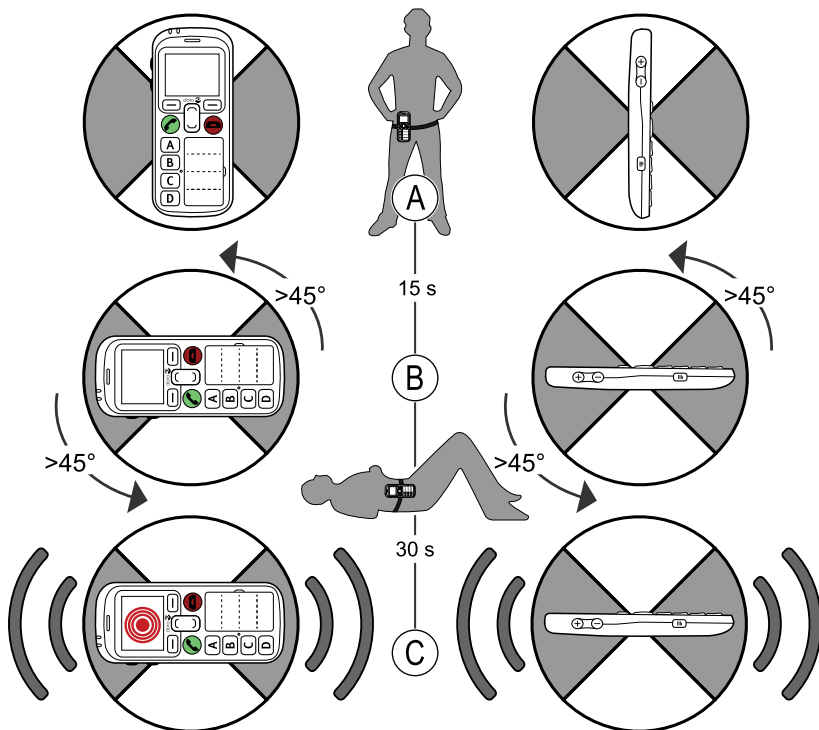


Bewegingsloos

- **Niet-alarmerende stand:** het apparaat is in beweging.
- **Automatische volgorde:** Ja.

Volgorde noodoproepen

1. De telefoon is langer dan 15 seconden bewegingsloos (hetgeen op bewusteloosheid van de drager kan duiden).
2. Na 30 seconden wordt de noodoproepprocedure op gang gebracht.
3. Om te annuleren zet u de telefoon binnen 5 seconden in beweging OF u drukt op **Ja** om te annuleren. Indien geen handeling volgt gebeurt het volgende:
 1. Er wordt een hulp-sms naar alle ontvangers verstuurd.
 2. Er wordt een positiebericht (sms-bericht) naar alle ontvangers verstuurd.
 3. De eerste ontvanger in de lijst wordt gebeld. Als de oproep niet binnen 25 seconden wordt beantwoord, wordt het volgende

nummer gebeld. Het kiezen wordt 3 keer herhaald of totdat de oproep wordt beantwoord of er op  wordt gedrukt.


Horizontaal & bewegingsloos

Combinatie van horizontaal en bewegingsloos.

Verticaal & bewegingsloos

Combinatie van verticaal en bewegingsloos.

Inschakelen van functie Gevallen

1. Druk op **Menu** en selecteer  **IUP**:
 - **Uit** om uit te schakelen.
 - **Horizontaal**
 - **Verticaal**
 - **Bewegingsloos**
 - **HOR & bewegingsloos** (combinatie van horizontaal en bewegingsloos).
 - **VERT & bewegingsloos** (combinatie van verticaal en bewegingsloos).
2. Druk op **OK** om te bevestigen.

Secure 580 (1011)

Dutch

Version 1.0

©2014 Doro AB. All rights reserved.

www.doro.com

CE 0700

REV 12152 – STR 20140611