

Hygiëne advies omtrent het reinigen van inmuRELAX en inmuDANCE

In deze rare tijd is goede hygiëne de prioriteit. De **inmu** is ontworpen om aangeraakt en fysiek contact te maken met de gebruiker, daarom is het ook makkelijk te wassen en te onderhouden. Hier hebben we een overzicht van hoe u de **inmu** makkelijk kan schoonmaken.

Ons advies over goede inmu-hygiëne:

- Alle soorten **inmu**-hoezen kunnen worden verwijderd en gewassen worden in de wasmachine of met de hand. Volg de instructies op het label of vindt de informatie op onze website <https://www.inmutouch.nl/instructievideo>.
- We raden u aan de wasinstructies te volgen. Wel is het mogelijk om de **inmuDANCE** hoes, evenals de **inmuRELAX** polyester hoes te wassen bij 95 graden, indien verhoogde hygiëne noodzakelijk is. (Let op: dit geldt niet voor de **inmuRELAX** hoezen van biologisch katoen).
*Wassen op hogere temperaturen kan kleine veranderingen in de kleur en kwaliteit van de hoes veroorzaken.
- Zowel de buitenste als de binnenste hoes van de **inmu** kunnen met een vochtige doek met water en zeep worden schoongemaakt. Of gereinigd met een desinfecterend doekje of andere ethanolbevattende middelen.
- Als de **inmu** door meerdere gebruikers wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij een instelling, dan raden wij u aan extra hoezen bij te kopen. De hoes kan dus worden gewisseld voordat een nieuwe gebruiker de **inmu** ontvangt.
- Het is niet precies bekend hoelang het virus op oppervlakten kan overleven, geschat wordt een paar uur tot meerdere dagen. Infectie kan niet alleen worden overgedragen door aanraking van objecten. Infectie vereist dat het virus in contact komt met de slijmvliezen van de mond, neus en ogen.

