

HANDLEIDING

EasyVox

Nederlands sprekend klokje



Hartelijk dank voor uw aanschaf van de EasyVox.


Wij hopen dat u plezier en gemak heeft met dit hulpmiddel.

Open het kastje van het klokje via de schroef aan de achterzijde. Dan zie je inwendig een jumper op de bodemplaat, tegenover de opening van de schroef.

Analoge wijze: als deze jumper over beide pinnetjes geschoven zit, dan werkt het klok op analoge wijze, ofwel easyvox werking.

Digitale wijze: zit de jumper op slechts één van beide pinnetjes, dan werkt het klokje op digitale wijze, ofwel tempovox werking genoemd.



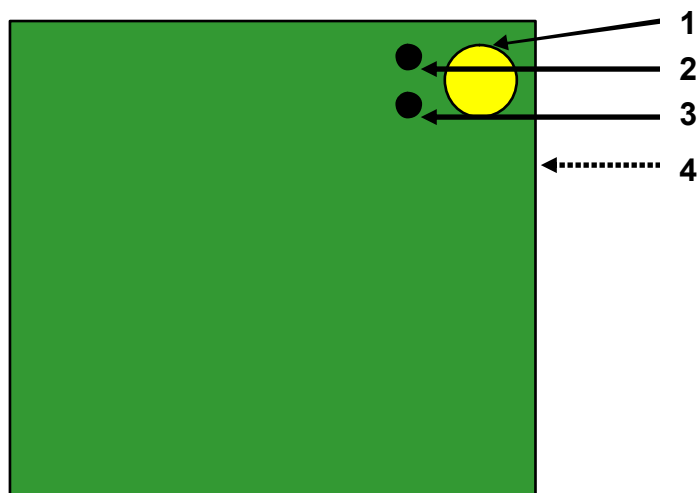

Wat is het verschil?

Analoge wijze: als het klokje analoog werkt en je drukt de grote, gele tijdschakelaar in (1), dan spreekt de EasyVox de tijd uit op analoge wijze.

Bijvoorbeeld, 12:50 uur wordt uitgesproken als: “10 minuten over 1 in de namiddag”.

Digitale wijze: als het klokje digitaal werkt en je drukt de grote, gele tijdschakelaar in (1), dan spreekt de EasyVox de tijd uit op digitale wijze.

Bijvoorbeeld, 12:50 uur wordt uitgesproken als: “12 uur, 50 minuten in de namiddag”.

Dit geldt eveneens voor de tijds- en wekkerinstellingen. In beide gevallen wordt nadien de datum uitgesproken en de instelling van het actieve alarm, als je de grote, gele tijdsknop (1) ingedrukt houdt na de tijdsmelding.

Het volstaat om de analoge werking uit te leggen. De digitale werking verschilt slechts in de uitspraak van de ingestelde tijden.

