

# WASVOORSCHRIFTEN

# INMU

## ONDERHOUD:

De buitenhoes van de **INMU** kan worden verwijderd en gewassen. Volg de wasinstructies voor de beste resultaten.

De goede kwaliteit van de hoes kan gewaarborgd worden door de wasinstructies zorgvuldig op te volgen.

De **INMU** is niet wasbaar, maar kan worden gedroogd met een vochtige doek.

## WASINSTRUCTIE:

De buitenhoes kan gewassen worden in de wasmachine.

Het is raadzaam om het op ruim 40 °C te wassen.

Gebruik geen wasverzachter en/of chloor.

**OPMERKING:** wassen op hogere temperaturen, kan niet worden gegarandeerd.

Aantal stappen voor het wassen:

1. Buitenhoes.
2. Draai de hoes binnenstebuiten doe de rits dicht, laat echter ongeveer 4 cm open zodat je de rits weer kunt pakken.
3. Doe het in de wasmachine en begin met wassen

## DROGEN:

Laat de buitenhoes plat liggend aan de lucht drogen.

**Niet** in de droger.

**Tip:** om krimpen te verminderen, kunt u de hoes voorzichtig in zijn vorm trekken terwijl de hoes nog vochtig is.

## MONTAGE:

Om de buitenhoes op de juiste manier om de **INMU** te plaatsen, -moet het waslabel zich vóór de ronde laadstekker bevinden.

Allergenen:

De **INMU** is gelabeld en gemaakt van allergie vriendelijk materiaal.

## Veiligheidsinstructie:

De **INMU** mag niet buitenshuis worden gebruikt..

Het product mag niet worden gebruikt bij temperaturen lager dan 5 graden Celsius of boven 45 graden Celsius.

De **INMU** of oplader mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht.

De **INMU** binnenhoes is waterdicht, vermijdt echter om deze in contact met water te brengen dit is geen garantie.

Het product kan een maximale druk aan van 100kg. Vermijd het gooien van de **INMU** naar puntige of harde voorwerpen.

Bewaar de **INMU** nooit in de buurt van brandbare apparaten.

Alleen de bijbehorende oplader en het snoer mogen worden gebruikt voor het opladen van de **INMU**.

Hoe wordt de **INMU** opgeladen:

De **INMU** stuurt een waarschuwingsgeluid (twee pieptonen) wanneer de batterij bijna leeg is.

1. Plaats de laadstekker in de ingangspoort van de **INMU**
2. Plaats de oplader in het stopcontact. De **INMU** geeft een kort geluidssignaal dat aangeeft dat de lading bezig is.

Tijdens het opladen zal de ingang een zwak zoemend geluid weergeven.

De **INMU** laadt op.

3. Verwijder na het opladen de stekker.

4. Volledig opgeladen kan de **INMU** ongeveer 3 weken gebruikt worden

### **Volume instelbaar**

Steek de stekker van de oplader in de **INMU** na 3 seconden kunt u de **INMU** indrukken waarbij er elke keer een volume geluid te horen is. Volume is instelbaar in 3 verschillende geluidsniveaus.

### **Opslag en transport**

Tijdens transport en opslag wordt het aanbevolen om de laadkabel aan te sluiten aan de **INMU** waardoor deze wordt uitgeschakeld.

### **VERWIJDERING EN RECYCLING:**

Dit product is gemaakt van materialen die gerecycled kunnen worden.

De **INMU** bevat een oplaadbare lithium-ion-accu die voldoet aan de EU-richtlijn 2006/66 / EC.

Controleer de lokale inzamelingsregels voor batterijen.

Neem voor vragen contact op met:

Dementie-winkel.nl

info@dementie-winkel.nl

035 - 523 95 06

