



Gebruiksaanwijzing AP-014 Bewegingsmelder met draadloze ontvanger



Gebruik

De bewegingsmelder met draadloze ontvanger wordt gebruikt om een waarschuwing af te geven wanneer er iemand langs de sensor loopt.

Fabrikant:
Medpage Limited T/A Easylink UK
3 Melbourne House
Corby Gate Business Park
Priors Haw Road, Corby
Northants NN17 5JG
United Kingdom

De ontvanger

Schuif het zwarte knopje aan de zijkant van de ontvanger omhoog. De ontvanger zal nu trillen, een piep-signaal afgeven en het groene lampje zal knipperen om aan te geven dat de pieper aan staat.

Wanneer de batterijen van de ontvanger vervangen dienen te worden, zal het rode lampje aan de voorkant van de pieper knipperen. De batterijen dienen dan zo spoedig mogelijk vervangen te worden. Het is aan te bevelen de batterijen elke 6 tot 12 maanden te vervangen. Om de batterijen te vervangen schroeft u aan de achterkant bij de riemclip de schroef los en haalt u het klepje eraf. Plaats 2 AA batterijen in de juiste richting in de ontvanger. Schuif het knopje aan de zijkant van de ontvanger naar ON.

De bewegingsmelder

De bewegingsmelder kan plat tegen de achtergrond of in een hoek worden opgehangen. De bewegingsmelder kan het beste op ongeveer 230 cm van de vloer omdat deze dan het grootste bereik heeft. Er dient minstens 3 centimeter tussen de bewegingsmelder en het plafond te zitten om deze werkzaam te laten zijn. Let bij het plaatsen op de volgende zaken:

- Plaats de bewegingsmelder niet richting het raam
- Plaats de bewegingsmelder niet in direct zonlicht
- Plaats de bewegingsmelder niet in een serre of op een winderige plaats
- Plaats de bewegingsmelder niet boven warmtebronnen of radiatoren
- Let erop dat huisdieren niet in de buurt van de bewegingsmelder komen
- Indien mogelijk, plaats dan de bewegingsmelder in de hoek van een ruimte zodat zo veel mogelijk van het bereik gebruikt wordt.

Wanneer de batterijen van de bewegingsmelder vervangen moeten worden, schroeft u de voorkant eraf en verwijdert de oude batterijen. Daarna plaatst u 2 nieuwe AA-batterijen en schroeft u de voorkant terug op de sensor. Zet de sensor weer aan door het knopje aan de zijkant omhoog te schuiven en wacht 1 minuut. Daarna zal de bewegingsmelder zijn werk weer kunnen doen. De batterijen dienen bij voorkeur elke 6 tot 12 maanden te worden vervangen.

De ontvanger en de bewegingsmelder aan elkaar koppelen

Om de ontvanger en de bewegingsmelder samen te laten werken, dienen deze op elkaar ingelezen te worden. Open de ontvanger aan de achterkant en zet de ontvanger aan. In het midden zit een rond, zwart knopje. Houd dit knopje ingedrukt gedurende enkele seconden, totdat het rode lampje aan de voorkant van de pieper gaat branden. De ontvanger staat nu in de zoekmodus. Zet de bewegingsmelder aan door het zwarte knopje aan de zijkant van de sensor omhoog te schuiven. Beweeg uw hand ervoor totdat er een rood lampje gaat branden in de bewegingsmelder en de ontvanger begint te trillen.

Wanneer er niet binnen 2 minuten een onderdeel aan de ontvanger gekoppeld wordt, zal deze automatisch uit de zoekmodus gaan. Wanneer u alsnog een onderdeel wilt installeren, activeert u de zoekmodus zoals hierboven beschreven. Mocht u de zoekmodus willen verlaten zonder een onderdeel te installeren, dan kunt u de ontvanger eenvoudigweg uitschakelen.



Gebruiksaanwijzing AP-014 Bewegingsmelder met draadloze ontvanger



Mocht het zo zijn dat een onderdeel al gekoppeld is aan de ontvanger, dan zal het rode lampje aan de voorzijde van de ontvanger 2 keer knipperen en blijft de ontvanger in de zoekmodus staan. Wanneer het geheugen van de ontvanger vol is, zal het lampje 5 keer knipperen. Wanneer u het geheugen van de ontvanger leeg wilt maken, schakel dan eerst de ontvanger uit. Vervolgens drukt u op hetzelfde knopje als voor de zoekmodus (het zwarte ronde knopje aan de achterzijde van de ontvanger) en terwijl u dit ingedrukt houdt, zet u de ontvanger weer aan. Het rode lampje aan de voorzijde van de ontvanger zal nu 3 keer knipperen om aan te geven dat het geheugen van de ontvanger gewist is. De ontvanger zal nu vanzelf weer in de zoekmodus gaan en u kunt nieuwe onderdelen aan de ontvanger koppelen.

Het instellen van de waarschuwingston

Met het schuifknopje aan de voorzijde van de ontvanger kunt u instellen wat u wilt horen wanneer de bewegingsmelder beweging waarneemt. In de bovenste stand zal de pieper alleen trillen. In de middelste stand trilt de ontvanger en maakt een middelhard geluid. In de onderste stand zal de ontvanger trillen en een hard geluid produceren.

Het knipperen van het lampje

Het lampje aan de voorzijde van de ontvanger kan een verschillend aantal keren knipperen. Hierna ziet u in een tabel wat de betekenis is van een knipperend lampje:

| Lampje | Rood | Groen |
|-----------------|---|------------------------|
| Staat aan | Zoekmodus | De ontvanger staat aan |
| Knippert | De batterij is bijna leeg | |
| Knippert 2 keer | Onderdeel is al bekend bij de ontvanger | |
| Knippert 3 keer | Geheugen van de ontvanger is gewist | |
| Knippert 5 keer | Geheugen van de ontvanger is vol | |

Gebruik van de ontvanger

Wanneer de ontvanger een signaal heeft ontvangen, blijft deze trillen en eventueel piepen totdat u de pieper uitschakelt. U kunt vervolgens de ontvanger weer aanzetten om opnieuw een melding te kunnen ontvangen. De onderdelen die aan de ontvanger gekoppeld kunnen worden, kunnen op 2 verschillende kanalen functioneren. Ook bestaat de mogelijkheid om op 2 verschillende kanalen een melding te krijgen voor lege batterijen. Om het onderdeel in te stellen op kanaal 2, opent u de achterkant van de bewegingsmelder en schuift u J1 over beide metalen pinnetjes (standaard zit deze over 1 pinnetje geschoven voor kanaal 1).

U kunt zo verschillende meldingen krijgen voor verschillende onderdelen die aangesloten worden op de ontvanger. Aan 1 ontvanger kunnen maximaal 10 onderdelen gekoppeld worden. Wanneer er een melding binnenkomt voor kanaal 1 zal de ontvanger 1 lang trilsignaal afgeven. Wanneer er een melding binnenkomt voor kanaal 2 zal de ontvanger meerdere keren korter trillen.